


機械器具 61 歯科用ハンドピース
歯科用ハンドピース
一般医療機器

プロフィール AR-ER4 (S)

【形状・構造等】

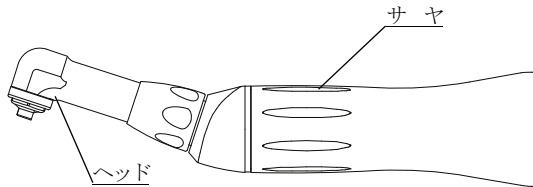

【使用目的】

ブラシ又はラバーカップを取り付け、患者の歯面の研磨及び歯垢の除去に使用する。

【品目仕様等】

販 売 名	プロフィール AR-ER4 (S)
許容入力 最高回転速度	20,000min ⁻¹
使用ポイント	ネジ式ブラシ又はラバーカップ

【操作方法又は使用方法等】

詳細については取扱説明書を参照すること。

- ① サヤのジョイント形状に合ったマイクロモーター、エアーモーター、ハンドピースへ取り付ける。
- ② ヘッド先端へブラシ又はラバーカップを取り付ける。
- ③ ブラシ又はラバーカップに研磨ペーストを塗り回転させて使用する。

【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を参照すること。

- ① 有資格者による歯科領域の治療にのみ使用のこと。
- ② ヘッド部の回転は5,000min⁻¹を超えないこと。
- ③ 口腔内では絶対に逆回転させないこと。
- ④ 使用する前に口腔外で空回転させ、振動、音、温度（発熱）等に異常を感じたら使用を中止すること。
- ⑤ 使用中異常を感じたら直ちに使用を中止し、販売店へ連絡すること。
- ⑥ 酸化電位水、または滅菌液での洗浄、浸漬、拭き取りは行わないこと。
- ⑦ 落下させるなど強い衝撃を与えないこと。
- ⑧ 分解、改造は行わないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1) 貯蔵・保管方法

- ① 水のかからない場所に保管すること。
- ② 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれのない場所に保管すること。

2) 耐用期間

製造の日から、正規の保守点検（消耗部品の交換）を行った場合に限り7年間とする。

【保守・点検に係わる事項】

詳細については取扱説明書を参照すること。

- ① 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- ② 各患者毎の治療後、必ずオートクレーブ滅菌を行うこと。
- ③ 135℃までの温度でオートクレーブ滅菌を行うこと。
例) 121℃で20分間、または132℃で15分間。
- ④ しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に装置が正常且つ、安全に作動することを確認すること。

【包装】

1箱の中に、ヘッド単品またはヘッドとサヤを組み合わせて包装される。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は住所等】

株式会社 ナカニシ

住 所：〒322-8666

栃木県鹿沼市下日向700

TEL：0289-64-3380

FAX：0289-62-5636