

## ダンインジェクト用投薬器セット

### 【形状・構造等】

本品は、ダンインジェクト(麻醉銃)用の各種投薬器、各種注射針、シリコン製シール及び安全キャップで構成される。

ダンインジェクト用投薬器は4種、ダンインジェクト用注射針は18種ある。

またシリコン製シールは2種、安全キャップは2種ある。

注射針の直径は1.5mm,2.0mm,2.2mmの3種、長さは20mm,25mm,30mm,38mm,40mm,60mm,100mmの7種、針の形状はプレーン、カラー(collared)、バーブド(barbed)の3種より構成される。

### 【性能、効能又は効果】

#### 1. ダンインジェクト用投薬器

投薬器が動物に命中した時の衝撃で、動物に麻醉剤を投薬する時に使用する。

#### 2. ダンインジェクト用注射針

動物に刺さり易く、抜け落ち難く、動物内に速やかに薬剤を注入する。又、適用動物別に、注射針の種類を変えることにより、動物に与えるダメージを少なくし、確実に投薬できる。

#### 3. シリコン製シール

注射針の先端部にある開口部をシールすることで、注入した薬液が漏れないように保持できる。対象動物に命中するとシールがずれ、投薬できる。

#### 4. 安全キャップ

薬液を注入し、加圧した状態の投薬器の注射針部分をキャップすることで、安全に取り扱うことができる。

### 【使用方法】

本品を構成する部品はすべて未滅菌品であり、使用前に煮沸消毒により投薬器及び注射針を適切に消毒する。

1. 投薬器用注射針にシリコン製シールを注射針の先端にはめ、側面の開口部が完全にふさがるまで押し込む。

2. 投薬器からスタビライザーを取り外し、気室弁をピンで中央に移動させる。

3. 加圧ポンプを使って薬室側の薬室弁を押し込む。

4. 必要な薬液を別の注射器に準備し、薬室に薬液を注入する。

5. 投薬器用注射針を投薬器の先端にしっかりと固定し、安全キャップをかぶせる。

6. 針先を上に向け、気室側(下側)に加圧ポンプを接続し、投薬器の気室に空気を送り込む。

7. 気室弁が固定されたら加圧ポンプを外し、スタビライザーを装着する。

8. 発射直前に安全キャップをはずす。

9. ダンインジェクト(麻醉銃)に投薬器を装填し、対象動物に向かって発射する。動物に命中するとシールが押し戻され、薬液が動物の体内に注入される。

### 【使用上の注意】

#### 1. 充填する医薬品

医薬品を充填する場合はその医薬品の添付文書等の指示に従って下さい。

#### 2. 使用する前の練習

精製水を使用して何回も練習して、取扱い方法を熟知し操作方法を完全に習熟して下さい。

#### 3. 空気注入量

注射針を装着した投薬器をその針先を垂直に上に向けた状態で保ち、付属の加圧ポンプを用いて各商品に必要な空気量を正確に気室に充填させて下さい。

#### 4. 操作上の注意

- ・薬室内に小さな気泡が見られても動物に害はありません。
- ・ダンインジェクト用投薬器に針を装着させる時は、針を投薬器にしっかりとねじ込んで下さい。
- ・スタビライザーは投薬器にしっかりとねじ込んで下さい。

#### 5. 保管上の注意

- ・注射針、投薬器、シールの再使用はできません。
- ・投薬器は太陽光の紫外線から保護して下さい。

### 【製造販売元】

イワキ株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-2

<https://www.iwaki-kk.co.jp>