

ダンインジェクト用ジャブスティック投薬器セット

【形状・構造等】

本品は、ジャブスティック本体、ナイロンシリンジ、各種注射針で構成される。

注射針は針径が2mmで針長が15,25,35mmの3種、さらに直径3mmで針長が15,25,40mmの3種から構成され、計6種ある。

【性能、効能又は効果】

1. ダンインジェクト用ジャブスティック投薬器セット

ジャブスティック本体の先端を動物に突き刺すと、圧縮空気によりシリンジ内の薬液を押し出し、動物に薬剤を投薬できる。また接続用スティックを接続することで、スティックの長さを1mから2mへ延長できる。

2. ナイロンシリンジ

1~10mLまでの薬剤を投薬できる。

3. ジャブスティック用注射針

動物に刺さり易く、動物内に速やかに薬剤を注入できる。

又、対象とする動物別に、注射針の種類を変えることにより、動物に与えるダメージを少なくし、確実に投薬できる。

【使用方法】

本品を構成する部品はすべて未滅菌品であり、使用前にシリンジ及び注射針を煮沸消毒する。

1. 注射針を選択し、シリンジにしっかりと固定する。

アルミニウムカートリッジがスティック本体に取り付けてある場合はスティック本体から取り外す。

2. スティック本体にあるアームロックを解除し、音がするまでアームを引き上げる。

3. 引き上げたアームを元の位置に戻す(手を挟まないよう注意してください)。

4. スティック先端部分にある安全ロックを止まるまで回転させ、ロックする。必要に応じてハンドグリップをはずして、延長用のスティックを接続することで2mに延長できる。

5. シリンジに薬液を入れる。

6. 薬液の入ったシリンジにアルミニウムカートリッジを装着し、スティックの先端に取り付ける(装着時にカートリッジの型にシリンジの向きを合わせてください)。

7. 投薬直前に安全ロックを止まるまで回転させ、ロックを解除する。

8. 対象動物に注射針が刺さる衝撃と同時にピストンがシリンジ内の薬液を押し、すばやく投薬できる。

【使用上の注意】

1. 充填する医薬品

医薬品を充填する場合はその医薬品の添付文書等の指示に従ってください。

2. 使用する前の練習

精製水を使用して何回も練習して、取扱い方法を熟知し操作方法を完全に習熟して下さい。

3. 操作上の注意

・ナイロンシリンジに針を装着させる時は、針をナイロンシリンジにしっかりねじ込んでください。

・投薬直前までは、ジャブスティック本体の安全ロックを解除しないでください。

4. 保管上の注意

・注射針、ナイロンシリンジの再使用はできません。

・ナイロンシリンジは太陽光の紫外線から保護してください。

・ジャブスティック本体が海水に触れた場合は、水道水で十分洗浄後、乾燥させてください。

【製造販売元】

イワキ株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-2

<https://www.iwaki-kk.co.jp>