


\* 機械器具 58 整形用機械器具  
一般医療機器 骨接合用又は骨手術用機械器具  
プリマドドリルアタッチメント

\* 【禁忌・禁止】

- ① 使用後は必ずすぐに、洗浄、注油、滅菌を行うこと。  
[血液等の内部凝固のおそれ]
- ② 回転中は、ツイストコレットは絶対に回さないこと。  
[ドリルが外れることによるけがのおそれ]
- ③ パー、ドリルは、弊社指定のドリル (別売品)、市販品のシャンク  
φ2.35mm パー以外は使用しないこと。[故障や事故のおそれ]
- ④ パー、ドリルの指定した最大回転数以下で使用するこ  
と。  
[故障や事故のおそれ]
- ⑤ 強く押しつけて、連続的に使用すること。  
[パーガードが破損しけがのおそれ]

【形状・構造等】

PD-2SD

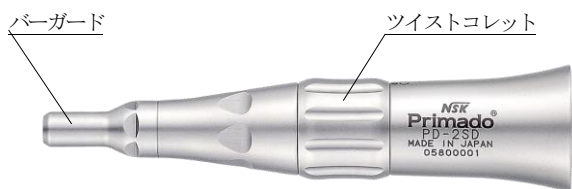

PD-2AD



\* PD-2SDM



\* PD-2ADM



\* 【使用目的】

患者の骨の穿孔を行うパー、ドリルを回転させるために用いる。

【品目仕様等】

許容最高回転速度……………60,000min<sup>-1</sup>

注水方式……………外部注水方式

\* 【操作方法又は使用方法等】

詳細については取扱説明書を参照すること。

- ① 使用前に必ず滅菌を行うこと。
- ② 本品をモーターハンドピースに接続する。
- ③ ツイストコレットを回し、パー、ドリル (シャンク径: φ2.35mm) を取り付ける。
- ④ モーターハンドピースを回転させ使用を開始する。

\* 【使用上の注意】

- ① 本品は獣医家向け製品であり、手技に精通した獣医師以外は使用しないこと。使用前に使用方法等熟知してから使用開始すること。
- ② 患者の安全を第一に考え、使用には十分注意を払うこと。
- ③ 落下させるなど強い衝撃は与えないこと。
- ④ パー、ドリルの指定した最大回転数以下で使用するこ  
と。
- ⑤ アタッチメントに合ったパー、ドリルを使用すること。
- ⑥ 使用中は、ツイストコレットは絶対に回さないこと。
- ⑦ パー、ドリルを装着していない状態では作動させないこと。
- ⑧ パー、ドリルの交換やアタッチメントを取り外す際は、モーターハン  
ドピースの回転が完全に停止してから行うこと。
- ⑨ 超音波洗浄装置、ウォッシュャーステリライザーにて洗浄しないこと。
- ⑩ 本品を安全に使用するため、パー、ドリルは手術ごとに新しいものに  
交換すること。
- ⑪ 術前に回転させて、発熱、騒音、芯振れ等の異常が無いことを確認す  
ること。
- ⑫ パー、ドリルを取り付けたとき、必ずパー、ドリルを軽く引いて確  
実に装着されていることを確認すること。
- ⑬ 作動中に本品をモーターハンドピースから着脱させないこと。
- ⑭ 使用後は必ずパー、ドリルをはずすこと。
- ⑮ 分解、改造は行わないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1) 貯蔵・保管方法

- ① 水のかからない場所に保管すること。
- ② 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを  
含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管す  
ること。
- ③ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

2) 耐用期間

製造の日から、正規の保守点検 (消耗部品の交換) を行った場合に限り  
5年間とする。

取扱説明書を必ずご参照ください。

**\*【保守・点検に係わる事項】**

詳細については取扱説明書を参照すること。

アタッチメントは、オートクレーブ滅菌が可能である。

また、使用後は直ちに以下の手順により、清掃、滅菌を行うこと。

- ① アタッチメントの外観に損傷や劣化がないか確認する。
- ② アタッチメントの表面の汚れを、医療用中性洗剤を含んだ布（毛羽立たないもの）、またはブラシ（金属製は不可）で十分に拭き取ってください。その後、蒸留水、脱イオン水、脱ミネラル水を含んだ布（毛羽立たないもの）で洗剤を拭き取ってください。
- ③ アタッチメントは熱水洗浄器の使用が可能です。
- ④ パナスプレーエックス（別売品）で十分に注油を行うこと。この手順が省略されると、製品本来の機能が阻害される恐れ（音、振動、熱、等）があり、かつ製品の寿命にも影響することがある。
- ⑤ 専用滅菌ケースなどに入れる。
- ⑥ 135℃までのオートクレーブ滅菌を行う。
- ⑦ しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に装置が正常且つ安全に作動することを確認すること。

**【包装】**

種類毎にそれぞれ1箱の中へ1本ずつ包装される。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者：株式会社ナカニシ

住 所：〒322-8666

栃木県鹿沼市下日向700

TEL：0289-64-3380

FAX：0289-64-5636

製造業者：株式会社ナカニシ