

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 骨接合用又は骨手術用機械器具


プリマドコントラアングルアタッチメント

【禁忌・禁止】

- ① 使用後は必ずすぐに、洗浄、注油、滅菌を行うこと。
[血液等の内部凝固のおそれ]
- ② バーの指定した最大回転数以下で使用する。
[故障や事故のおそれ]

【形状・構造等】

PD-CA-256 コントラアングルアタッチメント 256:1

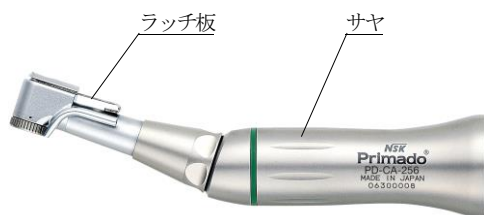

プリマドコントラアングルアタッチメントは、サヤの減速比の違いにより、PD-CA-256 以外にも以下の種類がある。

PD-CA-16 コントラアングルアタッチメント 16:1

PD-CA-64 コントラアングルアタッチメント 64:1

【使用目的】

骨の切削、穿孔等を行うバー、ドリルを回転させるために用いる。

【品目仕様等】

種 類	最高回転速度	減速比	使 用 バ ー	注水方式
PD-CA-16	3,750min ⁻¹	16:1	φ2.35mm コントラバー	外部注水
PD-CA-64	937min ⁻¹	64:1	φ2.35mm コントラバー	外部注水
PD-CA-256	234min ⁻¹	256:1	φ2.35mm コントラバー	外部注水

【操作方法又は使用方法等】

詳細については取扱説明書を参照すること。

- ① 使用前に必ず滅菌を行うこと。
- ② 本品をモーターハンドピースに接続する。
- ③ バー、ドリル（シャンク径：φ2.35mm）を取り付ける。
- ④ モーターハンドピースを回転させ使用を開始する。

【使用上の注意】

- ① 本品は獣医家向け製品であり、手技に精通した獣医師以外には使用しないこと。使用前に使用方法等熟知してから使用開始すること。
- ② 患者の安全を第一に考え、使用には十分注意を払うこと。
- ③ 落下させるなど強い衝撃は与えないこと。
- ④ 分解、改造は行わないこと。
- ⑤ アタッチメントに合ったバーを使用すること。

- ⑥ バーを装着していない状態では作動させないこと。
- ⑦ バーの交換やアタッチメントを取り外す際は、モーターハンドピースの回転が完全に停止してから行うこと。
- ⑧ 超音波洗浄装置にて洗浄しないこと。
- ⑨ 本品を安全に使用するため、バーは手術ごとに新しいものに交換すること。
- ⑩ 術前に回転させて、発熱、振れ等の異常が無いことを確認すること。
- ⑪ バーを取り付けたとき、必ずバーを軽く引いて確実に装着されていることを確認すること。
- ⑫ 使用後は必ずバーをはずすこと。
- ⑬ PD-CA-256 について、スクリューの締め付けに使用する際は、途中までとし、最後は手締めで行うこと。破損の原因になる。
- ⑭ PD-CA-16 及び PD-CA-64 については、タップの下穴あけに使用すること。スクリューの締め付けは行わないこと。破損の原因になる。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1) 貯蔵・保管方法

- ① 水のかからない場所に保管すること。
- ② 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ③ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

2) 耐用期間

製造の日から、正規の保守点検（消耗部品の交換）を行った場合に限り5年間とする。

【保守・点検に係わる事項】

詳細については取扱説明書を参照すること。

アタッチメントはオートクレープ滅菌が可能である。

また、使用後は直ちに以下の手順により、清掃、滅菌を行うこと。

- ① アタッチメント内部に付着した骨片や血液を除去するために、手術後直ちにパナスプレーエックス（別売品）で十分に洗浄・注油を行うこと。この手順が省略されると、製品本来の機能が阻害される恐れ（音、振動、熱、等）があり、かつ製品の寿命にも影響することがある。
- ② アタッチメント表面の汚れをブラシ（金属性は不可）等で払い落とし、消毒用アルコールを含ませた綿等で拭き取る。
- ③ 滅菌ケース、滅菌トレーに入れる。
- ④ 135℃までのオートクレープ滅菌を行う。
例) 121℃で20分間、または132℃で15分間。
- ⑤ しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に装置が正常且つ安全に作動することを確認すること。

【包装】

本品のいずれかが1箱に1本入る。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社 ナカニシ

住 所：〒322-8666

栃木県鹿沼市下日向700

TEL：0289-64-3380

FAX：0289-64-3890

製造業者：株式会社 ナカニシ