


機械器具 60 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科用エンジン

ビバメイト G5

【併用禁忌】

- ① 本製品は、電磁妨害波が存在する環境下では誤動作を起こす可能性があるため、電磁波を発生させる機器の周辺には設置しないこと。
- ② 本製品は、電気メスの影響を受ける可能性があるため、電気メス使用時には必ず電源を切る。

【形状・構造等】

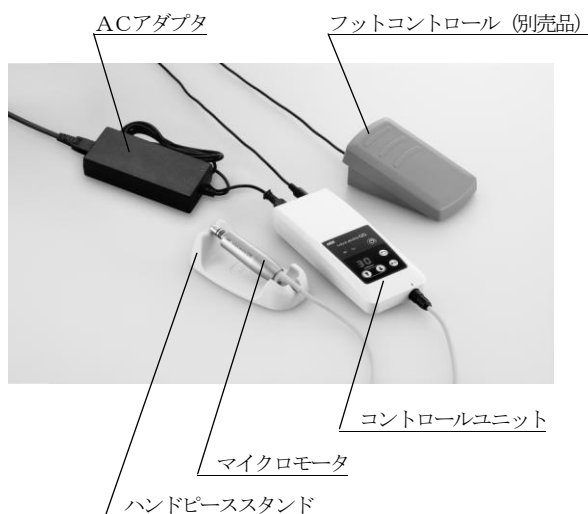

【使用目的】

歯、義歯、歯冠等を切削・研磨する機器を電氣的に駆動すること。

【品目仕様等】

<電氣的定格>

コントロールユニット

電源電圧 DC 24 V

マイクロモータ

入力電圧 モータ駆動用 DC 12 V
..... 照明用 DC 3.3 V

ACアダプタ

電源電圧 AC 100-240 V
電源周波数 50/60 Hz

<性能>

無負荷回転速度 3,000~30,000 min⁻¹
冷却水の供給 50 mL/min 以上 (0.25 MPa)
トルク 1.0 N・cm 以上 (停止トルク)
照度 10,000 lx 以上

【操作方法又は使用方法等】

詳細については取扱説明書を参照すること。

1) 使用前の準備

- * ① 【形状・構造等】の写真のとおり、各構成部品を接続する。
- ② マイクロモータのインサート部にハンドピース (別売品) を装着する。
- ③ ACアダプタのプラグを商用電源に差し込み、バッテリー電圧により必要な場合のみ充電を開始する。

2) 操作

- ① 電源キーを約 1 秒以上長押しして、電源を ON にする。
- ② 回転速度、回転方向を設定する。
- * ③ ON/OFF キーを押すと、モータが回転を始める。もう一度押すと停止する。フットコントロール (別売品) を接続している場合は、ペダルを踏むとモータが回転を始める。ペダルを踏んでいる間だけモータが回転する。
- ④ 治療が終了したら、マイクロモータを所定の場所に戻し、電源キーを約 1 秒以上長押しし、電源を OFF にする。

3) 清掃

コントロールユニット、マイクロモータは、消毒用アルコールを含ませた綿などで拭き取る。その他ハンドピース等は各取扱説明書に従って清掃を行う。

【使用上の注意】

詳細については、取扱説明書を参照すること。

- * 1) 本品は、獣医師などの医療従事者が、病院等医療機関、往診等で使用すること。
- 2) 機器を使用する前には次の事項に注意すること。
 - ① スイッチの接触状況、極性、メーター類などの点検を行い、正確に作動することを確認すること。
 - ② すべてのコードの接続が正確で且つ安全であることを確認すること。
- * ③ 機器の併用は診断を誤らせたり、危険を及ぼす恐れがあるので、十分注意すること。
- 3) 機器の使用中は次の事項に注意すること。
 - ① 診断、治療に必要な時間、量を越えないように注意すること。
 - ② 機器全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。
 - ③ 機器全般及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で装置の作動を停止するなどの適切な処置を講ずること。
 - ④ 機器に患者が触れることのないよう注意すること。
- 4) 機器の使用後は次の事項に注意すること。
 - ① 定められた手順により、使用前の状態に戻した後電源を切ること。
 - ② コード類の取り外しに際しては、コードを持って引くなど無理な力をかけないこと。
 - ③ 付属品、コードなどは、清拭した後整理してまとめておくこと。
 - ④ 機器は次回の使用に支障のないよう必ず清拭しておくこと。
 - ⑤ 故障したときは勝手にいじらず適切な表示を行い、修理は専門家に依頼すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1) 貯蔵・保管方法

- ① 水のかからない場所に保管すること。
- ② 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ③ 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などに対する安定状態に注意すること。
- ④ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

2) 耐用期間

製造の日から、正規の保守点検を行った場合に限り 7 年間とする。

【保守・点検に係わる事項】

詳細については取扱説明書を参照すること。

- ① 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- ② しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に装置が正常且つ、安全に作動することを確認すること。

【包装】

- ・コントロールユニット…………… 1 台
- ・マイクロモータ…………… 1 本
- ・ACアダプタ…………… 1 個
- ・電源コード…………… 1 本
- ・ハンドピーススタンド…………… 1 個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は住所等】

製造販売業者：株式会社ナカニシ

住 所：〒322-8666

栃木県鹿沼市下日向700

ナカニシお客様相談窓口



0120-7242-56

受付時間 9:00～17:00（土・日祝祭日を除く）

TEL：0289-64-3380（代表）

FAX：0289-62-5636

製造業者：株式会社ナカニシ