

整形用機械器具
一般医療機器 その他の整形用機械器具

Arix Vet 電動ドライバ

動物用 再使用禁止

【警告】


1. 本品は、単回使用であり、再使用は禁止である。
2. 他の製造販売業者のドライバーブレードと併用しないこと。
3. 人体に使用しないこと。

【禁忌・禁止】

1. 本品は、使用目的以外の目的に使用しないこと。[使用目的以外への使用は、本品の破損につながるおそれがあるとともに、機能の確保が不能となる]

【形状・構造及び寸法等】

1. 形状及び構造

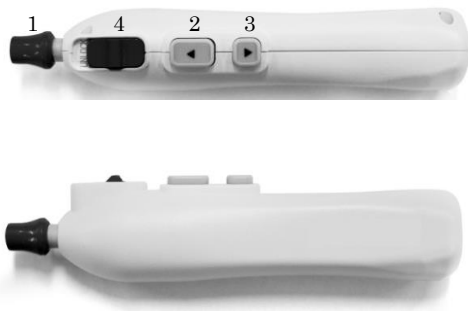

2. 原理

本品は電池、直流モーター及び制御回路で構成されている。切換スイッチを UNLOCK 側へスライドさせることにより、モーターが作動可能な状態となる。回転ボタンを押すと、内蔵されている電池から電気を供給し、DC モーターの出力軸が回転運動し、直結されているシャフト部が回転する。これにより、シャフト部に接続するドライバーブレードが回転する。

3. 電氣的定格及び仕様

形式 (111-ED-)	050	051	052
電源電圧 (V)	6.0	4.5	3.0
回転数 (rpm)	210±10%	165±10%	110±10%
トルク(Ncm)	45±10%	40±10%	35±10%

4. 主な機能

No.	名称	機能
1	シャフト部	ドライバーブレードを接続する部分
2	右回転ボタン	シャフト部が時計回りに回転する
3	左回転ボタン	シャフト部が反時計回りに回転する
4	切換スイッチ	モーターの作動、非作動を切り換える

【性能、使用目的又は効果】

本品は、ドライバーブレードと組み合わせて使用する電池電源式（単回使用）の手術器械であり、外科手術に際して、ドリリングや骨の固定・接合に用いるプレートを固定するためのスクリューを挿入又は抜去するのに用いる。


【使用方法】

1. 使用前の準備

- 1) 本品は滅菌済みであり、単回使用である。
- 2) 使用前に本品の点検を行うこと。滅菌包装及び外観に損傷がないことを確認し、損傷がある場合には、絶対に使用しないこと。


2. 使用方法

- 1) シャフト部を本体側へスライドさせ、手技に適した滅菌済みのドライバーブレード（申請外）を差し込む。ドライバーブレードは、滅菌済みのものを使用する。本品には必ず Jeil Medical 社製のドライバーブレードを使用すること。

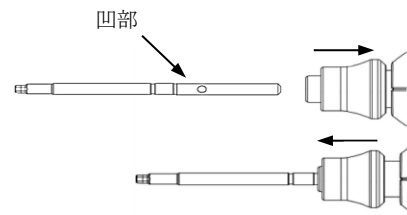


※凹部とボールジョイント部が適切に接続されると「パチン」と本品先端部が元の位置に戻る


- 2) 電動操作を行う場合には、切換スイッチをスライドさせて、「UNLOCK」を表示させる。

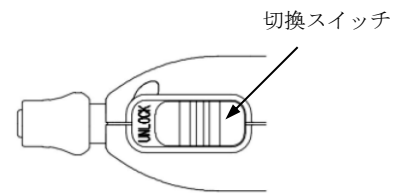

- 3) 右回転（時計回り）ボタン 2 又は左回転（反時計回り）ボタン 3 を押し、モーターを作動させる

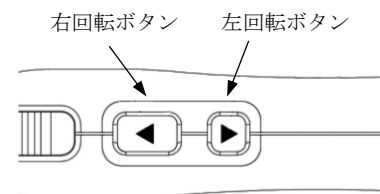

- 4) より強い回転力が必要な場合には、切換スイッチ 4 を先端側へスライドさせロックし、手動にて任意の方向へ回転させる。

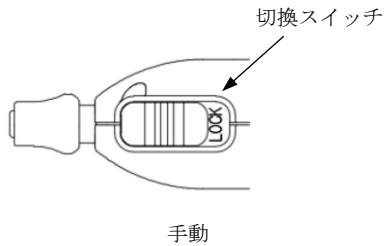

3. 使用後の取扱い

使用後の製品には感染症の危険性があるため、法律や施設の規則に従って扱い、医療廃棄物として廃棄すること。

【使用上の注意】

1. 使用上の注意

- 1) 使用前に本品が正しく動作するか確認すること。
- 2) ドライバーブレードが確実に接続されていることを確認すること。[確実に接続されていない場合、動力が伝わらないため]
- 3) 使用前に動作異常（振動、異音、過熱、回転等）があった場合には、使用しないこと。[事故、故障、不具合などの原因となるため]
- 4) 本品には必ず Jeil Medical 社製のドライバーブレードを使用すること。[動作不良、故障、不具合などの原因となるため]
- 5) ドライバーブレードは、滅菌済みのものを使用すること。[感染症の恐れがあるため]
- 6) ドライバーブレードをシャフト部に接続するときは、必ず電源をオフ（回転ボタンを押さない）にすること。[事故、故障、不具合などの原因となるため]
- 7) 同時に両方のボタン（右回転 / 左回転）を操作しないこと。[故障、不具合などの原因となるため]
- 8) 本体を分解・修理・改造しないこと。[故障、不具合などの原因となるため]

2. 取り扱い上の注意

組み合わせて使用するドライバーブレード（販売名：Arix Vet インストゥルメント）の添付文書を使用前によく読むこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 保管温度： 10～35℃
- 2) 保管湿度： 20～85% RH
- 3) 気 圧： 500～1060hPa
- 4) 直射日光の当たらないところで保管すること。
- 5) 可燃性の液体やガスから離して保管すること。

2. 有効期間

有効期間： 製造後 3 年間

【製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社ジェイ・シー・ティ

Tel : 082-871-3308