


機械器具 58 整形用機械器具  
一般医療機器 骨接合用又は骨手術用機械器具

## クラニオトムアタッチメント200

### 【禁忌・禁止】

- ① 使用後は必ずすぐに、洗浄、注油、滅菌を行うこと。  
[血液等の内部凝固のおそれ]
- ② 回転中はツイストコレットを絶対に回さないこと。  
[バーが外れることによるけがのおそれ]
- ③ バーは、弊社指定のプリマドバー（別売品）以外は使用しないこと。[故障や事故のおそれ]
- ④ バーの指定した最大回転数以下で使用すること。  
[故障や事故のおそれ]

### 【形状・構造等】

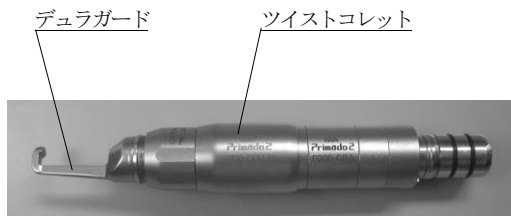

### 【使用目的】

患者の頭蓋骨の骨切除。

### 【品目仕様等】

許容最高回転速度……………80,000min<sup>-1</sup>

使用バー……………クラニオトム用バー  
ルーターバー

### 【操作方法又は使用方法等】

詳細については取扱説明書を参照すること。

- ① 本品をモーターハンドピースに接続する。
- ② 専用バーを取り付け、ツイストコレットを回して固定する。
- ③ デュラガードを差し込み、着脱リングをしっかりと締める。
- ④ モーターハンドピースを回転させ使用を開始する。

### 【使用上の注意】

- ① 本品は獣医家向け製品であり、手技に精通した獣医師以外は使用しないこと。使用前に使用方法等を熟知してから使用を開始すること。
- ② 患者の安全を第一に考え、使用には十分注意を払うこと。
- ③ 落下させるなど強い衝撃は与えないこと。
- ④ 分解、改造は行わないこと。
- ⑤ デュラガードのサイズに合ったバーを使用すること。
- ⑥ 使用中は、ツイストコレットを絶対に回さないこと。
- ⑦ バーを装着していない状態では作動させないこと。
- ⑧ バーの交換や本品を取り外す際は、モーターハンドピースの回転が完全に停止してから行うこと。
- ⑨ 超音波洗浄装置、ウォッシュャーステライザーにて洗浄しないこと。

- ⑩ 本品を安全に使用するため、バーは手術ごとに新しいものに交換すること。
- ⑪ 術前に回転させて、発熱、騒音、芯振れ等の異常が無いことを確認すること。
- ⑫ バーを取り付けたとき、必ずバーを軽く引いて確実に装着されていることを確認すること。
- ⑬ ツイストコレットやデュラガードのロック、そして本品がモーターハンドピースにしっかりと固定されていることを確認してから作動させること。
- ⑭ 作動中に本品をモーターハンドピースから着脱させないこと。
- ⑮ 骨に噛み込んだ場合は、一度反対方向に戻してから再度作動すること。
- ⑯ 骨切除は適度な力を加えて行うこと。骨に噛み込んだ状態で、無理に押し込むと、モーターに負荷がかかり過ぎ、バーの破損やモーターの故障につながる可能性がある。
- ⑰ 使用後は必ずバーをはずすこと。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

#### 1) 貯蔵・保管方法

- ① 水のかからない場所に保管すること。
- ② 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分等を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ③ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

#### 2) 耐用期間

製造の日から、正規の保守点検（消耗部品の交換）を行った場合に限り5年間とする。

### 【保守・点検に係わる事項】

詳細については取扱説明書を参照すること。

- アタッチメント、デュラガードは、オートクレーブ滅菌が可能である。また、使用後は直ちに以下の手順により、洗浄、注油、滅菌を行うこと。
- ① アタッチメント、デュラガードの外観に損傷や劣化がないことを確認する。
  - ② アタッチメント、デュラガードの表面の汚れを、医療用中性洗剤を含んだ布（毛羽立たないもの）、またはブラシ（金属製は不可）で十分に拭き取ること。その後、蒸留水、脱イオン水、脱ミネラル水を含んだ布（毛羽立たないもの）で洗剤を拭き取ること。
  - ③ アタッチメントは熱水洗浄器の使用が可能である。
  - ④ パナスプレーエックス（別売品）で十分に注油を行うこと。この手順が省略されると、製品本来の機能が阻害される恐れ（音、振動、熱等）があり、かつ製品の寿命にも影響することがある。
  - ⑤ 専用滅菌ケースなどに入れる。
  - ⑥ 135℃までのオートクレーブ滅菌を行う。
  - ⑦ しばらく使用しなかった機器を再使用する際には、使用前に装置が正常かつ安全に作動することを確認すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

**【包装】**

本品が1箱に1本入る。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者：株式会社ナカニシ

住 所：〒322-8666

栃木県鹿沼市下日向700

TEL：0289-64-3380

FAX：0289-62-5636

製造業者：株式会社ナカニシ