

2025年6月作成 Z001

貯法 室温、気密容器

ベトスキャン UA テストストリップス

【使用目的】

犬及び猫の尿中の白血球、ケトン体、亜硝酸塩、ウロビリノーゲン、ブドウ糖、ビリルビン、タンパク質、pH、比重、潜血、アルブミン、アスコルビン酸、カルシウム、クレアチニンの測定

【構成製品】

販売名	構成試験紙(略号 ¹)
ベトスキャン UA テストストリップス10	LEU、KET、NIT、URO、BIL、GLU、PRO、SG、pH、BLD
ベトスキャン UA テストストリップス14	LEU、KET、NIT、URO、BIL、GLU、PRO、SG、pH、BLD、ASC、MA、Ca、CR

【形状・構造等(キットの構成)】

構成試験紙ならびに各構成試験紙に含まれる反応系に関連する成分

構成試験紙	略号 ¹	反応系に関連する成分
白血球試験紙	LEU	<i>N</i> -トシル- <i>L</i> -アラニン 3-インドキシルエステル 2-メトキシ-4-(<i>N</i> -モルホリノ)ベンゼンジアゾニウムクロリド塩化亜鉛複塩
ケトン体試験紙	KET	ニトロプルシドナトリウム水和物
亜硝酸塩試験紙	NIT	スルファニルアミド <i>N</i> -1-ナフチルエチレンジアミン二塩酸塩
ウロビリノーゲン試験紙	URO	ファストブルーB
ビリルビン試験紙	BIL	2,4-ジクロロベンゼンジアゾニウムテトラフルオロホウ酸塩
ブドウ糖試験紙	GLU	グルコースオキシダーゼ ペルオキシダーゼ 4-アミノアンチピリン
タンパク質試験紙	PRO	テトラプロモフェノールブルー
比重試験紙	SG	プロモチモールブルー ペンテト酸
pH試験紙	pH	プロモクレゾールグリーン プロモキシレノールブルー
潜血試験紙	BLD	クメンヒドロペルオキシド 3,3',5,5'-テトラメチルベンジジン
アスコルビン酸試験紙	ASC	2,6-ジクロロインドフェノールナトリウム
アルブミン試験紙	MA	ローズベンガルナトリウム塩
カルシウム試験紙	Ca	o-クレゾールフタレインコンプレキソン
クレアチニン試験紙	CR	塩化パラジウム(II) モーダントブルー29

【使用方法】

- 測定する直前に必要な枚数のテストストリップを容器から取り出し、直ちに密栓する。
- よく攪拌した検体に、1~2秒間テストストリップを完全に浸すか、スポイトで試験紙に検体を垂らす。
- テストストリップについての余剰尿は、検体容器の縁で軽くふく、又は長辺を吸収紙にしみ込ませる等により取り除く。
- 検体を塗布したテストストリップを専用機器(ベトスキャン UA アナライザー)にセットする。
- 専用機器の使用方法に従い測定する。

【使用上の注意】

(全般的な注意)

- 本製品は、体外診断用でありそれ以外の目的に使用しないこと。
- 診断は他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断すること。
- 添付文書に記載された使用方法及び使用目的以外で使用しないこと。
- 本製品による測定は、目視ではなく、専用の動物用医療機器(ベトスキャン UA アナライザー)を用いて行うこと。
- 本品での尿比重測定はイオンとして存在する溶質のみを測定するため、比重計による測定値とは一致しないことがある。

(操作上の注意)

- 検体を清潔な容器に採取すること。
- 検体をすぐに使用しない場合、15~25℃に保存し、1時間以内に使用するか、冷蔵(2~8℃)保存し4時間以内に使用すること。
- 検体は15~25℃の状態で使用すること。
- 検体を冷凍しないこと。
- 検体を日光に当てないこと。
- 検体に防腐剤を添加しないこと。

¹ LEU:白血球、KET:ケトン体、NIT:亜硝酸塩、URO:ウロビリノーゲン、BIL:ビリルビン、GLU:ブドウ糖、PRO:タンパク質、SG:比重、BLD:潜血、ASC:アスコルビン酸、MA:(マイクロ)アルブミン、Ca:カルシウム、CR:クレアチニン

(使用上又は取り扱い上の注意)

1. 取扱い上の注意

- ・本製品を取り扱う際は手袋を使用すること。
- ・テストストリップの試験紙(パッド)部分には手を触れないこと。

2. 使用上の注意

- ・本製品は室温で保存し、寒冷地あるいは冷蔵庫等に保存した場合は容器を開けずに、15～25℃になるまで待ってから使用すること。
- ・容器ラベルに記載された使用期限を経過したものは、使用しないこと。使用期限内であっても、変色や黒ずみのある劣化したものは使用しないこと。
- ・容器開栓後は、3か月以内に使用すること。
- ・テストストリップは使用直前に容器から取り出し、取り出した後はすぐに使用すること。
- ・吸湿を防ぐため、テストストリップを取り出した後、容器はただちに密栓すること。
- ・揮発性薬品によるテストストリップへの汚染をさけてください。
- ・乾燥剤を取り出さないこと。

3. 廃棄上の注意

- ・使用済みの本製品、測定した残りの検体、検体に接触した器具及び容器などは、必ず適切な処理をした後、地方公共団体条例等に従い処分すること。

【製品情報お問い合わせ先】

ゾエティス・ジャパン株式会社


〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-22-7

TEL:0120-317-955 FAX:0120-317-965

月曜日～金曜日 9:00～12:30、13:30～18:00受付

※土日祝祭日及び弊社休業日は除く

【取扱説明書等】

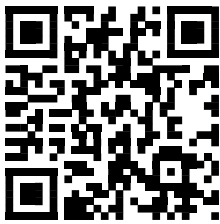

【製造販売(輸入)】

ゾエティス・ジャパン株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-22-7