


スパイク付ワクチン用チューブ

【形状・構造及び原理等】

スパイク付ワクチン用チューブ
シングル

スパイク付ワクチン用チューブ
ダブル

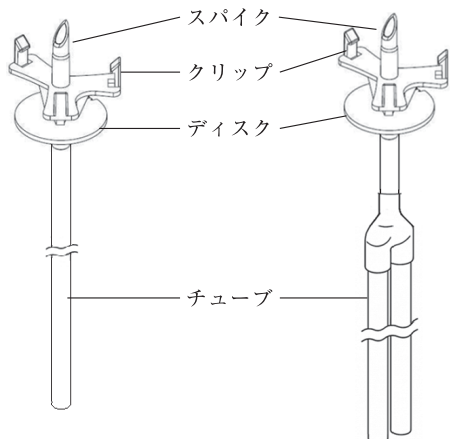

【使用目的】

ワクチンバッグから注射器へのワクチンの送液

【使用方法】

- (1) ディスクの下を保持する。
- (2) クリップが折れないよう、ワクチンバッグのゴム栓の中心に、スパイクをねじりながらゆっくり差し込む。
- (3) クリップをワクチンバッグの首部に固定する。
- (4) チューブを注射器に送液する接続部に接続する。

【使用上の注意】

(一般的注意)

- ・本品は単回使用である。再使用しないこと。
- ・添付文書に記載された使用方法及び使用目的以外で使用しないこと。
- ・破損しているものは使用しないこと。

(取扱い上の注意)

- ・スパイクで手を傷つけないよう注意すること。
- ・スパイクの針部に直接触らないこと。
- ・ワクチンバッグのゴム栓にスパイクを差し込む際は、何度も刺しなおさないこと。
- ・本品を過度に引っ張ったり、チューブを折り曲げる等して負荷を加えないこと。
- ・使用中は破損、接続部の緩みや漏れについて、適宜確認すること。
- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・本品を廃棄する際は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・使用済みの本品は、消毒又は滅菌後に地方公共団体条例等に従い処分、若しくは感染性廃棄物として処分すること。

【製品情報お問い合わせ先】

ゾエティス・ジャパン株式会社

〒151-0053

東京都渋谷区代々木3-22-7

TEL：03-5309-9224 FAX：03-5309-9914

月曜日～木曜日 9：00～12：30、13：30～18：00

金曜日 9：00～12：30、13：30～16：00受付

※土日祝祭日および弊社休業日は除く。

【製造販売(輸入)】

ゾエティス・ジャパン株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-22-7