

機械器具 60 歯科用エンジン  
 歯科用エンジン  
 一般医療機器

## タスカルウィズ

### 【禁忌・禁止】

- ① 本製品は充電式電池専用です。マンガン電池、アルカリ電池は絶対に使用しないこと。[液漏れ、破裂のおそれ]
- ② モーターハンドピースや充電器に水や薬液がかからないようにすること。  
[ショートによる火災発生や感電、錆による故障のおそれ]

### 【併用禁忌】

- ① 本製品は、電磁妨害波が存在する環境下では誤動作を起こす可能性があります。電磁波を発生させる機器の周辺には設置しないこと。
- ② 本製品は、電気メスの影響を受ける可能性があるため、電気メス使用時には必ずメインスイッチを切ること。

### 【形状・構造等】



コントラアングルヘッドには、使用目的により以下の種類があります。  
 ARS-F4R、ARK-F4R、NAC-F4R、TEQ-F4R、  
 EVA-F、PR-F

### 【品目仕様等】

#### (1) 充電器

定格電圧……100VAC 50/60Hz  
 電源入力……4.5VA  
 出力……4VDC  
 充電時間……約90分

#### (2) モーターハンドピース

定格電圧……2.4VDC  
 電源入力……0.3VA

### 【使用目的】

本品は、患畜の歯牙の切削などに用いる。

### 【操作方法又は使用方法等】

詳細については取扱説明書を参照すること。

- ① モーターハンドピースを充電します。
- ② モーターハンドピース先端へ使用するコントラアングルヘッドを装着します。
- ③ 電源/回転速度選択キーを2秒以上押してモーターハンドピースをONにします。
- ④ 再度、電源/回転速度選択キーを押し、取り付けたコントラアングルヘッドの減速比と表示を合わせます。
- ⑤ 回転方向を正逆切替キーにより選択します。
- ⑥ モーターハンドピース先端のON/OFFキーを押すことにより、回転を開始し使用できます。
- ⑦ 使用を停止するときは、ON/OFFキーを再度押します。電源をOFFにする時は、電源/回転速度選択キーを2秒以上押します。

### 【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を参照すること。

- ① 電池は必ず同じ種類のものを2本同時に入れ替えて使用すること。
- ② 分解、改修は絶対に行わないこと。
- ③ モーターハンドピースや充電器等は落下させないこと。充電器は平らで安定した場所に置くこと。
- ④ 万一、電池の液が漏れて目に入った場合は、失明の恐れがあるので直ちにきれいな水で十分に目を洗い、専門医の診断を受けること。
- ⑤ 万一、電池の液が漏れて皮膚や衣服に付着した場合は、皮膚に障害を起こす場合があるので直ちにきれいな水で十分に洗い流すこと。
- ⑥ モーターハンドピース内の電池の液漏れや、モーターハンドピース外装の変形、部分的な変色に気が付いたときは直ちに使用を中止して販売店へ連絡すること。
- ⑦ 長い間ご使用にならないときは、電池を抜くこと。
- ⑧ 電池は、弊社推奨の市販のものをお買い求めのこと。またご使用の際は、電池メーカーの取扱説明書をよく読むこと。
- ⑨ 曲がったバー、傷の付いたバー、変形したバー、規格に合わないバーは使用しないこと。
- ⑩ 直射日光の強いところ、炎天下の車内、火のそば、またストーブの近く等の高温になる場所での使用や放置をしないこと。
- ⑪ ガタ、振動、音、温度（発熱）に十分注意して、ご使用前にあらかじめ回転させ点検を行うこと。その時、少しでも異常を感じたら直ちに使用を中止して販売店へ連絡すること。
- ⑫ 装着しようとするバーのシャンクはいつもきれいにしておくこと。
- ⑬ ヘッドやバーを交換する際は、モーターハンドピースの電源をOFFにしてから行うこと。
- ⑭ 充電器にモーターハンドピースを差し込む際は、向きに注意すること。
- ⑮ 充電器の充電端子部に針金、安全ピン等、導電性のものが入らないようにすること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

- ⑯ 充電器にモーターハンドピースを差し込む際は、モーターハンドピースに付着した液体等をよく拭き取ってから差し込むこと。
- ⑰ モーターハンドピースへの注油は行わないこと。
- ⑱ モーターハンドピースは、オートクレーブ等の高温となる滅菌をしないこと。
- ⑲ モーターハンドピースは、市販の単4形ニッケル水素電池を使用すること。
- ⑳ 長期間ご使用にならない場合は、電池を抜いておくこと。

**【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**

1) 貯蔵・保管方法

- ① 水のかからない場所に保管すること。
- ② 温度、湿度、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ③ 傾斜のない、また振動、衝撃などの加わらない場所に安定状態にて保管すること。
- ④ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

2) 耐用期間

製造の日から、正規の保守点検を行った場合に限り7年間とする。

**【保守・点検に係わる事項】**

詳細については取扱説明書を参照すること。

- ① 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- ② しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に装置が正常且つ、安全に作動することを確認すること。

**【包装】**

充電器・・・・・・・・・・・・・・ 1個

モーターハンドピース・・・・・・ 1本

電源コード・・・・・・・・・・・・ 1個

コントラアングルヘッドは、顧客の要望により組み合わせられて包装します。

以上のものが1箱の中に入り出荷されます。

また、1箱の中にコントラアングルヘッドのみが包装される場合もあります。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は住所等】**

株式会社 ナカニシ

住 所：〒322-8666

栃木県鹿沼市下日向700

TEL：0289-64-3380

FAX：0289-62-5636

取扱説明書を必ずご参照ください。

OM-E0519