

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器


NSK 外科・歯科用バー

再使用禁止


- 【禁忌・禁止】**
- ① 再使用禁止
 - * ② 高速回転下で使用されるため、切削中に破折し、患者を傷つける恐れがあり、【使用上の注意】を逸脱した使用をしないこと。
[傷、やけどのおそれ]
 - ③ 曲がったバー、傷の付いたバー、変形したバー、規格に合わないバーは使用しないこと。
[バー破損によるけが及び誤飲のおそれ]
 - * ④ 最高回転数を超えた使用はしないこと。
[バー破損によるけが及び誤飲のおそれ]

* 【形状・構造等】

① ステンレスバー

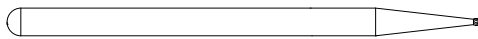


② ダイヤモンドバー

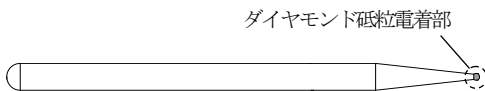


③ 超硬カーバイドバー



④ ステンレスエッグバー

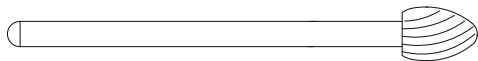


⑤ ダイヤモンドディスク

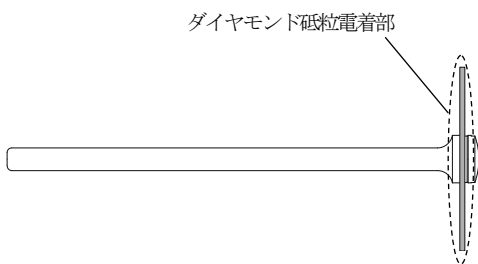


⑥ ツイストドリル




⑦ ステンレスバー

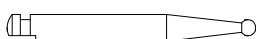


⑧ ダイヤモンドバー

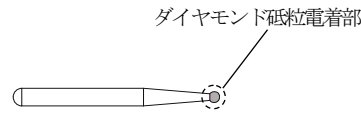


⑨ 精密スチールカッター

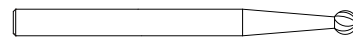

⑩ スチールカッター

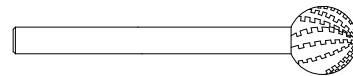

⑪ ダイヤモンドディスク (ショート)

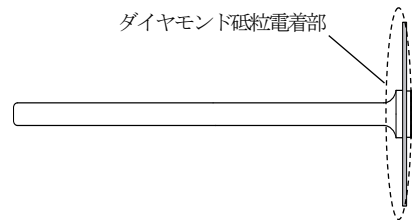

* 【品目仕様等】

種類名	ヘッド径 (mm)	バーの長さ (mm)	シャフト径 (mm)	最高回転数 (min ⁻¹)
① ステンレスバー	φ0.6~7.0	70	φ2.35	20,000 ~ 80,000
② ダイヤモンドバー	φ0.6~7.0	70	φ2.35	40,000 ~ 80,000
③ 超硬カーバイドバー	φ0.6~7.0	70	φ2.35	20,000 ~ 80,000
④ ステンレスエッグバー	φ4.0~6.0	70	φ2.35	20,000
⑤ ダイヤモンドディスク	φ19	70	φ2.35	5,000
⑥ ツイストドリル	φ1.0~2.0	70	φ2.35	40,000
⑦ ステンレスバー	φ1.0~1.8	22	φ2.35	40,000
⑧ ダイヤモンドバー	φ1.0~1.8	19 ~ 22	φ1.6	200,000
⑨ 精密スチールカッター	φ1.0~4.0	45	φ2.35	35,000
⑩ スチールカッター	φ6.0	45 ~ 50	φ2.35	35,000
⑪ ダイヤモンドディスク (ショート)	φ19	40 ~ 50	φ2.35	20,000

【使用目的】

骨接合用又は骨手術用機械器具に接続されるハンドピースに取り付け、患者の歯牙や骨の切削などに用いられる。

【操作方法又は使用方法等】

骨接合用又は骨手術用機械器具などの駆動源に接続されるハンドピースへ装着し、回転させ、ソフトタッチで断続的に切削物に押し付けて切削する。

【使用上の注意】

- ① 使用前に、ハンドピースが正常に作動することを確認すること。ハンドピースの各メーカーの指示に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チェックでないことを確認すること。きついなどの異常を感じた場合は、使用しないこと。
 - ② 使用する前に空回転させ、振れがないことを確認すること。
 - ③ 頭部の細い、長い、大きい形状のものは、破折や曲がりを起こしやすいので、無理な角度、過度の加圧での使用はしないこと。
 - ④ 使用時には、注水下でソフトタッチで使用する。
 - ⑤ カーバイドバーのように切刃があるものは、破折防止のためソフトタッチで使用する。
- * ⑥ 本品は未滅菌製品であり、感染を引き起こす恐れがあるので使用前に必ず135℃までの温度でオートクレーブ滅菌を行うこと。
ただし、⑨精密スチールカッター～⑩ダイヤモンドディスク（ショート）は滅菌せずに消毒を行うこと。
- ⑦ 製品を使用する際には、眼の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
 - ⑧ 使用前に刃の破損等の劣化や異常がないことを確認すること。劣化や異常が見られた場合は、使用しないこと。
 - ⑨ 本品は、指定以外の用途に使用しないこと。
 - ⑩ 強い衝撃を与えたり、落下させないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1) 貯蔵・保管方法

- ① 水のかからない場所に保管すること。
- ② 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれのない場所に保管すること。

* 【保守・点検に係わる事項】

曲がり、破損、ヒビ、傷、腐食等があった場合は、廃棄すること。

* 【包装】

1本または複数のセットで包装される。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は住所等】

製造販売業者：株式会社ナカニシ

住 所：〒322-8666

栃木県鹿沼市下日向700

TEL：0289-64-3380

FAX：0289-62-5636

製造業者：株式会社ナカニシ